

FDV: MEDISINSK MUNNBIND, PLF .20 Type II F/ ENGANGSBRUK



Medisinsk munnbind til beskyttelse for medisinsk personell og generell engangsbruk.

| Egenskaper | Kontroll | Akseptable begrensninger |
|-----------------------|----------------|--------------------------|
| Bakteriefiltrering | EN 14683:2019 | ≥98% |
| Trykksensor | EN ISO 11737-1 | < 40 Pa/cm ² |
| Mikrobiell belastning | EN 14683:2019 | ≥30CFU/g |

Munnbind til å beskytte ansikt (munn og nese) og til delvis beskyttelse mot bakterier og mot dråpesmitte gjennom luftveiene, samt for å unngå å spre smitte.

Rektangulært munnbind, produsert i 3 lag, med parallelle bretter på tvers for god og effektiv filtrering, og for full dekning av nedre del av ansiktet. Produsert med nese-bøyle for god tilpasning og komfort, og med elastiske ørestrikk på begge sider. Bakteriell filtreringseffektivitet på inntil 98% ved korrekt bruk. Munnbindet er ikke sterilt. Komfortabel å puste i, luktfri, uten latex og uten fiberglass. Skånsom mot huden.

- One Size,
- Str. 9,5x17cm
- 3 lags bestående av et ytterlag av ikke-vevet fibermateriale polypropylen (SBPP), et mellom-sjikt av smelteblåst polypropylen, statisk ladet for bedre partikkelmotstand / fratstøting og et inner-lag av ikke-vevet fibermateriale polypropylen (SBPP).
- Nesestripen er metallbelagt med polymer
- Ørestrikkene består av polyester, polypropylen og elastin
- Produsert iht. Europeisk og Internasjonal kvalitets- og produksjonskrav for medisinsk utstyr.

Instruksjoner for bruk av munnbind

- Vask hendene nøye før du tar på munnbindet
- Farget side skal vende utover
- Nestestripen skal gå over nesen og ørestrikkene dras bak øret
- Pass på at munnbindet dekker munn, nese og kinn
- Press nesestripen i riktig passform rundt nesten
- Unngå å ta på munnbindet når det er i bruk
- Berør kun ørestrikkene når munnbindet skal tas av
- Kast munnbindet etter bruk
- For mer informasjon om bruk av munnbind- se FHI sine sider <https://www.fhi.no/publ/plakat/munnbind/>